


Poradnik doboru soczewek multifokalnych Proclear® 1 day

Wiele różnych pacjentów. Jedna prosta metoda doboru soczewki.

Prosta i przystępna metoda doboru soczewki.

- Konstrukcja asferyczna z centralną strefą do blizy
- Jeden profil mocy
 - Zachowanie widzenia w dali bez pogorszenia ogólnej jakości widzenia
- Wzmocnienie mocy do blizy dla oka niedominującego
 - Optymalne widzenie obuoczne w blizy i w odległościach pośrednich
 - Odpowiednia dla pacjentów z dodatkiem do +2,50 ADD
- Bardziej naturalne wrażenia wzrokowe

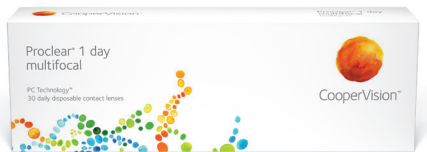

Poradnik doboru soczewek

Krok 1 Sprawdź refrakcję i określ oko dominujące.

Krok 2 **Oko dominujące:** wybierz soczewkę o odpowiedniej mocy do dali według recepty.
Oko niedominujące: wybierz soczewkę o zalecanej wartości „wzmocnienia do blizy” dodanej do mocy do dali zgodnie z dodatkiem, jakiego wymaga pacjent:

Moc dodatku pacjenta (ADD)	Wzmocnienie do blizy
do +1,00	Wzmocnienie nie jest konieczne.
+1,25 do +1,75	+0,75 D
+2,00 do +2,50	+0,75D do +1,00D

Przykład - refrakcja: -2,00 widzenie obuoczne i dodatek +1,75 ADD

Soczewki Proclear 1 Day multifocal

Oko dominujące

Oko niedominujące

-2,00

-1,25

Krok 3 Zanim ocenisz ostrość widzenia, pozwól soczewce ustabilizować się. Jeśli pacjent jest zadowolony z widzenia, zakończ proces.

Wskazówki dla osiągnięcia najlepszych wyników

Aby poprawić widzenie w dali, wykonaj nadrefrakcję co +/- 0,25D dla oka dominującego przy widzeniu obuocznym. Wielu specjalistów zauważyło, że dodanie +0,25D dla oka dominującego przy Kroku 2 poprawia widzenie w dali.

Aby poprawić widzenie w blizy, wykonaj nadrefrakcję co +/- 0,25D dla oka niedominującego przy widzeniu obuocznym.

Jedna innowacyjna metoda. Wiele powodów, aby wybrać soczewki Proclear.

Lepsza jakość widzenia w bliży bez pogorszenia widzenia w dali.

- Łatwa adaptacja użytkownika do nowej mocy soczewek wraz z postęпами prezbipii
 - Jeden profil mocy
 - Mniejszy kompromis wobec jakości widzenia w dali
- Konstrukcja soczewki pozwala na uproszczoną metodę doboru
 - Mniej czasu spędzonego na fotelu w gabinecie i mniej wizyt kontrolnych
- Szeroki, efektywny zakres parametrów
- Nowe podejście do potrzeb wzrokowych użytkownika soczewek jednodniowych

Wiele różnych pacjentów. Jedna soczewka Proclear.

Działają różnie w każdym oku zachowując jednak prawidłowe widzenie obuoczne

- Wykorzystuje różne moce dla każdego oka, aby poprawić widzenie w bliży z mniejszym kompromisem wobec widzenia w dali
- Wysyła oddzielne, niezakłócone sygnały do każdego oka, dzięki czemu mózg tworzy wyraźniejszy obraz

Zdecydowana przewaga nad monowizją

- Utrzymuje widzenie obuoczne przy wyższej mocy dodatku (ADD), zapewniając lepszą jakość widzenia niż monowizja
- Poprawia widzenie stereoskopowe, widzenie w odległościach pośrednich oraz widzenie nocne
- Prawdziwa konstrukcja multifokalna

Specyfikacja produktu

Soczewki Proclear 1 day multifocal

Moc od -10,00D do +6,00D
(co 0,50 powyżej -6,00D)

ADD Jeden profil mocy

Promień krzywizny 8,7 mm

Średnica 14,2 mm

